


# チェックMR-COV19<sup>®</sup>を使用される方のための操作ガイド

## 検体採取方法

### 鼻腔ぬぐい液の採取

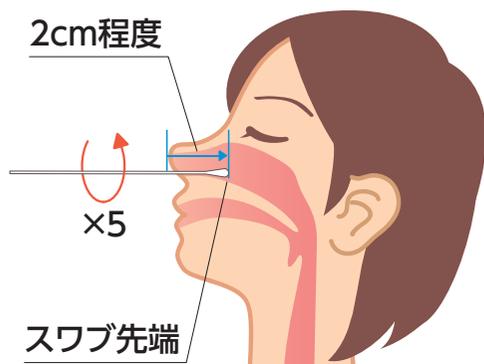

キット付属の滅菌綿棒を鼻腔部分(鼻腔から2cm程度の部分)に挿入し、挿入後、滅菌綿棒を5回程度回転させた後、5秒程度静置して採取する。

#### 〈使用上の注意〉

- ご使用の際は、電子化された添付文書をよくお読みください。
- 本品の判定が陰性であっても、SARS-CoV-2感染を否定するものではありません。

## 操作方法

### 1 検体を抽出する



滅菌綿棒を検体抽出液に浸す。  
検体抽出容器の外側から滅菌綿棒を指でつまんだり上下させて充分浸透させる。  
その後、しごく様に滅菌綿棒を引き抜く。

### 2 ノズルを挿入する


抽出容器にノズルを挿入する。



### 3 滴下する

抽出容器は垂直を保持し、3滴を守ってご使用ください

テストプレートの試料滴下部に3滴滴下する。

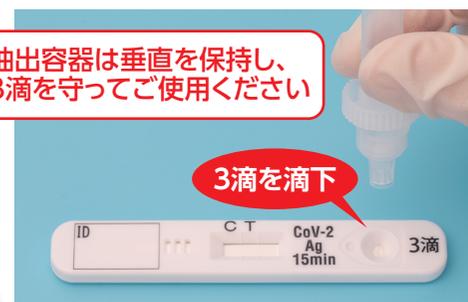

## 判定方法

### 陽性

CとT部分に赤紫色のライン  
(陽性については、3~15分後)



15分以内でも、赤紫色のラインがCとTに認められたときは、陽性とする。

### 陰性

C部分のみに赤紫色のライン



### 無効

C部分に赤紫色のラインが認められない



別のテストプレートでやり直してください。

C: コントロールライン (確認部)  
T: テストライン (判定部)

15分後に結果判定



参考動画〈チェックMR-COV19の使い方〉  
動画でわかりやすく操作方法を紹介しています。  
電子化された添付文書もご覧いただけます。

[https://www.meiji-seika-pharma.co.jp/check\\_mr-cov19/index.html](https://www.meiji-seika-pharma.co.jp/check_mr-cov19/index.html)

販売元 Meiji Seika ファルマ株式会社  
東京都中央区京橋 2-4-16  
<https://www.meiji-seika-pharma.co.jp/>

製造販売元 ROHT<sup>®</sup>  
ロート製薬株式会社  
大阪市生野区巽西1-8-1

CCOV000703<sup>®</sup>  
(MA)  
改訂: 2023.3  
02M-24Y

体外診断用医薬品

# SARSコロナウイルス抗原キット チェックMR-COV19<sup>®</sup>

## 形状・構造(キットの構成)

1. テストプレート：( )枚  
(1テストプレート中)
  - ・抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体(マウス)
  - ・金コロイド標識抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体(マウス)
2. 検体抽出液(アジ化ナトリウム0.09%含有)：( )本
3. 付属品
  - ・滅菌綿棒：( )本
  - ・ノズル(フィルター付き)：( )個

## 貯蔵方法

2～30℃

## 包装単位

( )検体用

詳細は電子化された添付文書をご参照ください。



箱・キットは10キット入り製品のイメージ画像です。

製造番号	
使用期限	年 月