


Check MR-COV19 用户操作指南

采样方法

采集鼻拭子

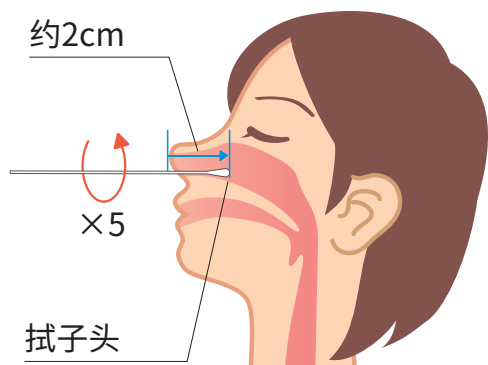

将试剂盒自带的无菌棉签插入鼻腔中，插至距鼻腔入口约2cm的部位，插入后，旋转无菌棉签约5次，静置5秒左右进行采集。

电子版说明书

- 使用前请仔细阅读电子版说明书 (日文)。
- 即使本品的判读结果为阴性，也并不代表完全排除了感染SARS-CoV-2的可能性。

操作方法


1 提取样本



把无菌棉签浸入样本提取液中。上下移动无菌棉签，并通过样本提取容器的外侧挤压无菌棉签确使其被提取液充分浸透。最后使无菌棉签在挤压的情况下被抽出。

2 插入滴头


把滴头插入提取容器中。

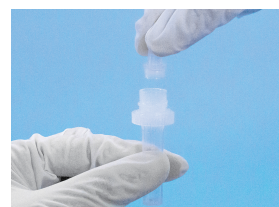

3 滴样

提取容器须始终保持垂直，滴入量也须确保为3滴

向检测卡的样本滴加区滴入3滴。

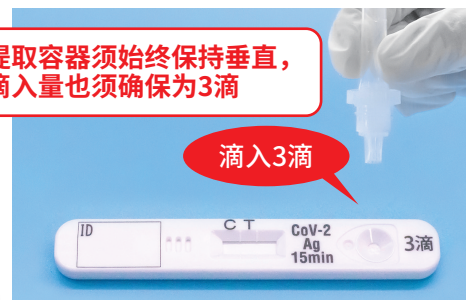

15分钟后判读结果

判读方法

阳性

C区和T区各出现一条紫红色条带 (阳性在3~15分钟之后检出)



如果C区和T区各出现一条紫红色条带，即使未经过15分钟，也视为阳性。

阴性

仅C区出现一条紫红色条带



无效

C区无紫红色条带出现



请另外使用新的检测卡重新检测。

C: 对照线 (确认区)
T: 检测线 (判读区)



参考视频〈Check MR-COV19的使用方法〉
视频 (日文) 中通俗易懂地介绍了操作方法。
电子版说明书 (日文) 也可扫描此处查看。

https://www.meiji-seika-pharma.co.jp/check_mr-cov19/index.html

Distributor

Meiji Seika Pharma Co., Ltd.

2-4-16 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-8002, Japan

Manufacturer

ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd.

1-8-1 Tatsumi-nishi, Ikuno-ku, Osaka 544-8666, Japan

CCOV001102(S)

(MA)
改訂: 2023.3
02M-24Y

体外诊断用医药品

COVID-19抗原检测试剂盒

Check MR-COV19

形状、结构（试剂盒组成）

1. 检测卡：（ ）个
（1个检测卡中）
 - 抗SARS-CoV-2单克隆抗体（小鼠）
 - 胶体金标记抗SARS-CoV-2单克隆抗体（小鼠）
2. 样本提取液（含0.09%叠氮化钠）：（ ）支
3. 配件
 - 无菌棉签：（ ）支
 - 滴头（带过滤器）：（ ）个

贮藏方法

2~30°C

包装单位

（ ）份样本用

详见电子版说明书（日文）



示意图（10份）

生产编号	
有效期	年 月